


Dcont® ETALON B vércukormérő rendszer összehasonlítása labor referenciával 600 mérés adatai alapján.

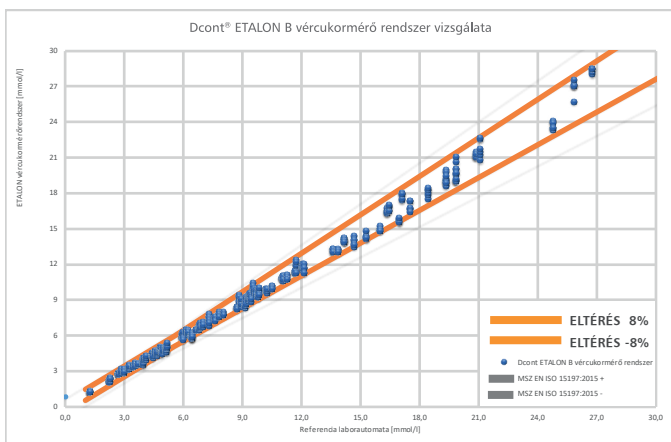

#### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MÉRÉSI ELV:	bioszenzor
VÉRMINTA:	0,6 µl kapilláris teljes vér
MÉRÉSI TARTOMÁNY:	0,6 – 33,3 mmol/l
KIJELZÉS:	0,6 mmol/l alatt: Lo 33,3 mmol/l fölött: Hi
MÉRÉSI IDŐ:	4 másodperc
MEMÓRIA MÉRETE:	720 adat
KIJELZŐ:	folyadékkristályos kijelző (LCD)
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:	90 másodperc után
INTERFÉSZ:	bluetooth
ELEMEK:	2 darab 3V-os elem (CR2032)
ELEMEK ÉLETTARTAMA:	1000 mérés, vagy egy év
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:	4 – 45 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20-(+50) °C
MŰKÖDÉSI ÉS TÁROLÁSI PÁRATARTALOM:	10-90% RH
MÉRET:	100 X 58 X 20 MM
TÖMEG:	~ 71g (elemekkel)

A Dcont® ETALON B vércukormérő, az ETALON TESZT Tesztcsík gyógyászati segédeszköz.

Dcont® | ETALON B

Gyártó és forgalmazó:

 77 ELEKTRONIKA Kft.

/ H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.

/ ZÖLDSZÁM: 06 80 27 77 77 / TEL.: 06 1 206 1480

/ EMAIL: [ugyfelszolgalat@e77.hu](mailto:ugyfelszolgalat@e77.hu) / [www.dcont.hu](http://www.dcont.hu)

/ [www.e77.hu](http://www.e77.hu)

D73-9301-3

Lezárás dátuma: 2022.09.19.

ÚJ

Dcont® | ETALON B

Dcont®  
eNAPLÓ



A dcont.hu mobilapplikáció elérhető android és iOS eszközökön is.

VÉRCUKORMÉRŐ  
BLUETOOTH  
KAPCSOLATTAL!



Valós idejű adatmegosztás a  
Dcont® eNAPLÓ-n keresztül.

[dcont.hu](http://dcont.hu)

## BLUETOOTH KAPCSOLATTAL

- ▶ azonnali automatikus adatátvitel a vércukormérőről a mobiltelefonra
- ▶ valós idejű adatmegosztás a Dcont® eNAPLÓ-n keresztül



ÚJ



A Dcont® ETALON B készülék ETALON Teszt tesztcsíkkal használható.



Az ETALON Teszt tesztcsíki árairól, a felírhatóság feltételeiről kérjük olvassa be a QR kódot vagy látogasson el a [http://www.neak.gov.hu/felso\\_menu/szakmai\\_oldalok/gyogyszer\\_segedeszkoz\\_gyogyfurd\\_o\\_tamogatas/egeszsegugyi\\_vallalkozasoknak/puphag/Vegleges\\_PUPHAG.html](http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalok/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurd_o_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/puphag/Vegleges_PUPHAG.html) honlapra.




/ **BLUETOOTH KAPCSOLAT**  
A mérési adatok bluetooth-on keresztül letölthetők a dcont.hu eNapló-ba.




/ **VÉRFELSZÍVÁS A CSÍK TELJES VÉGÉN**  
Kisebb csík, nagyobb vérfelszívási felület!  
A vérfelszívás a tesztcsíki teljes végén, nem kell „célozni” a vércsappal



/ **HIPOGLIKÉMIA UTÁN ISMÉTELT MÉRÉSRE TÖRTÉNŐ FIGYELMEZTETÉS**  
Hipoglikémia után a készülék képes arra, hogy az ismételt mérés szükségességét automatikusan jelezze

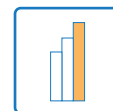

/ **KEZELÉSI CÉLÉRTÉK SZERINTI SZÍNES LED VISSZAJELZÉS**  
A hipoglikémiás, a jól kontrollált, ill. a hiperglikémiás tartomány határát egyénre szabottan be lehet állítani. A vércukormérő ez alapján vizuális jelzést ad betegének

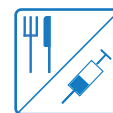

/ **AZ ÉTKEZÉS, AZ INZULINADÁS IDŐPONTJÁNAK RÖGZÍTÉSE**  
A Dcont® ETALON B egyszerűen képes rögzíteni az étkezés vagy az inzulinadás időpontját. Ezek később az eNAPLÓ elemzése során nagyban segíthetik a terápia eredményeinek értékelését



/ **ÉTKEZÉS UTÁNI VÉRCUKORMÉRÉS IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA**  
Az étkezés előtti (jelölt) mérést követően 1 / 1,5 / 2 órával a Dcont® ETALON B hangjelzéssel figyelmeztet az étkezés utáni mérés esedékességére




/ **ÉHOMI / ÉTKEZÉS ELŐTTI ÉS ÉTKEZÉS UTÁNI VÉRCUKORMÉRÉSI EREDMÉNYEK JELÖLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**  
A jelölők automatikus villogással hívják fel a beteg figyelmét használatukra, így egyszerűen rögzíthetők



/ **BEÁLLÍTHATÓ ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER**  
Az eNapló felületen Ön vagy orvosa szakmai útmutatása alapján a beteg beállíthatja, hogy mikor esedékes a vércukormérés, melyre a Dcont® ETALON B hangjelzéssel figyelmeztet\*

\*A Dcont® eNAPLÓ szoftver és a Dcont® mobilalkalmazás független termékek, elérhetőségükkel kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunknál vagy a [www.dcont.hu](http://www.dcont.hu) weboldalon

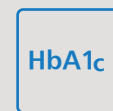

HbA1c tartomány becslése




személyre szabható figyelmeztetések



gyors eredmény 4 mp



vérvételi hely megvilágítás

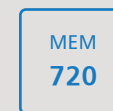

nagy memória 720 eredmény



hipoglikémia eseményszám becslése